

Clivon™ Gel

PER PREVENIRE I SINTOMI E LE COMPLICAZIONI DELLA SECCHENZA VAGINALE



CE Dispositivo Medico
Classe 1
Direttiiva 93/42/CEE

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:
Dispositivo Medico.

PRINCIPI ATTIVI:

- ◆ *Mimosa tenuiflora*
- ◆ *Agliconi di Soia*
- ◆ *Acido ialuronico*
- ◆ *Acido Lattico*
- ◆ *Film idrofilico*

MODALITÀ D'USO: *Travasare nella cannula la quantità di gel consigliata (2-3 ml al giorno). Introdurre la cannula il più profondamente in vagina e far fuoriuscire il gel. Per uso vaginale. Applicare preferibilmente la sera prima di andare a dormire.*

FORMATO: *Tubo in alluminio da 30 ml inserito in un astuccio con foglietto illustrativo.*

MIMOSA TENUIFLORA:

Ha proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti utili in presenza di arrossamenti e di microulcerazioni vaginali. Ha inoltre attività anti-ialuronidasi cioè inattiva l'enzima responsabile della demolizione dell'acido ialuronico, che quindi rimane inalterato più a lungo.

AGLICONI DI SOIA:

Svolgono un'azione lenitiva ed emolliente sulle pareti vaginali, e promuovono la sintesi di acido ialuronico che assicura idratazione alle cellule; le quali diventano più elastiche, forti e producono il glicogeno, alimento naturale per i lattobacilli e che utilizzano per produrre l'acido lattico.

ACIDO IALURONICO:

È in grado di preservare e migliorare il grado di idratazione e turgidità delle cellule epiteliali, promuovendo la loro naturale azione antinfiammatoria.

ACIDO LATTICO:

Contribuisce a riequilibrare l'ecosistema vaginale e a ridurre il pH vaginale a 4.5, creando così un ambiente sfavorevole alla proliferazione dei patogeni responsabili della sensazione di bruciore e prurito.

FILM IDROFILICO:

È costituito da particolari polimeri dalle notevoli capacità umettanti e lubrificanti che conferiscono al prodotto caratteristiche di viscosità simili a quelle del muco vaginale.